

Стероक्स окси + Tourbillon E



Стерокс окси – препарат для дезинфекции, ДВУ и стерилизации изделий медицинского назначения

Активированный раствор: НУК – 0,27%,
перекись водорода – 2,9%.

pH 5.5

Многократное применение в течение
срока годности (10 дней)



Новое в инструкции 2019:

ДВУ и стерилизация ИМН – в моюще-дезинфицирующих машинах и установках (репроцессорах)

Вид обработки	Виды изделий	Время экспозиции	Способ обработки
Дезинфекция ИМН и эндоскопов	Инструменты, в т.ч. хирургические и стоматологические	5 мин	Ручной
	Жесткие и гибкие эндоскопы		
	Стоматологические оттиски		
ДВУ	Гибкие эндоскопы	5 мин	Ручной и механизированный в МДМ
Стерилизация	ИМН, жесткие и гибкие эндоскопы	20 мин	Ручной
	Гибкие эндоскопы		Механизированный в МДМ

Турбиллон Е – энзимное средство для ручной и механизированной очистки (на основе протеазы)

Назначение:

- Предварительная и окончательная очистка эндоскопической техники
- Предстерилизационная очистка медицинских изделий и эндоскопов



Хорошие моющие свойства при низком пенообразовании

Не повреждает термолабильные материалы

pH

pH нейтральное средство
(pH 1% раствора – 6-8)

Хорошо отмывает фиксированные органические загрязнения, в т.ч. застарелые



Схема применения для эндоскопов

Моюще-дезинфицирующие машины
погружного типа (репроцессоры)

Tourbillon E

+

стерокс или

стерокс окси

Получен положительный **отзыв** по сочетанному
применению Tourbillon E и «Стерокс окси» из отделения
эндоскопии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского

