



**Стерилизация и ДВУ ИМН  
(препараты ИНТЕРСЭН-плюс)**

# Препараты для ДВУ и стерилизации

Стерокс



Готовое к применению средство для ДВУ и стерилизации на основе альдегидов

Стерокс окси



Двухкомпонентное средство на основе НУК и перекиси водорода

Стерокс порошок



Кислородсодержащий гранулированный порошок на основе перкарбоната натрия

## Основные характеристики препаратов

Препарат	Стерокус	Стерокус окси	Стерокус порошок
Состав	Стабилизированный глутаровый альдегид 2,7% ингибитор коррозии	НУК 0,27%, перекись водорода 2,9%, ингибитор коррозии,	Перкарбонат натрия 50%, ТАЭД, нПАВ, ингибитор коррозии
Объем	5 л	5 л	1,5 кг
Срок годности рабочего раствора	90 суток	10 суток	1 сутки
Ph раствора	6	5,5	7,2

# Основные режимы дезинфекции, ДВУ, стерилизации

Препарат	Стерокс	Стерокс окси	Стерокс порошок
Дезинфекция (ИМН и эндоскопы)	5 мин	5 мин	(бактерии, вирусы, грибы, кроме туберкулеза) 0,5% - 20 мин 1,0% - 10 мин
			М.Террае 1,0% - 30 мин (ручн) 1,0% - 15 мин (МДМ)
ДВУ	10 мин	5 мин	1,0% - 15 мин 2,0% - 5 мин
Стерилизация	30 мин	20 мин	1,0% - 30 мин 2,0% - 15 мин

# Стерокс порошок

- Высокоэффективный кислородсодержащий препарат для дезинфекции, ПСО, ДВУ и стерилизации
- Не портит обрабатываемые поверхности, не вызывает коррозии металлов

По результатам Научного отчета «Исследование воздействия рабочих растворов Стерокс порошок на материалы и конструктивные элементы ИМН, в т.ч. жестких и гибких эндоскопов» препарат **рекомендован** для дезинфекции, ПСО, ДВУ и стерилизации ИМН и эндоскопов, в т.ч. производителей TOSHIBA, OLYMPUS, Karl Storz



Для удобства дозирования в комплекте – мерная ложка

# Новые объекты обеззараживания

**Кувезы и приспособления (3.10)**

**Транспорт (включая автотранспорт, ж/д и метрополитен)**

**Стоматологические оттиски, слюноотсосы**

**Объекты, пораженные плесенью (3.22)**

**Инструментарий, кухонное оборудование и посуда (общепит)**

**Пиявки после проведения гирудотерапии**

**Влагонепроницаемые на матрасники (3.6)**

**Системы вентиляции и кондиционирования (3.7)**

**Холодильное и морозильное оборудование (3.13)**

## Добавлен механизированный способ обработки

Дезинфекция ИМН в МДМ и УЗ-установках  
(ранее – только ручным способом и в УЗ-установках)

## Обработка с использованием МДМ

ДВУ эндоскопов

Стерилизация ИМН  
и эндоскопов (ранее  
– ручным способом)

Дезинфекцию, ДВУ и стерилизацию можно проводить механизированным способом в МДМ. Раздел подготовлен с учетом требований [СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах"](#).

# Генеральные уборки (изменения в режимах)

Профиль учреждения	Было	Стало
Оперблоки, родзалы, перевязочные, процедурные	0,5% - 30 мин	0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 2,0% - 5 мин
Противотуберкулезные ЛПУ	1,0% - 60 мин 2,0% - 30 мин	0,5% - 60 мин 1,0% - 30 мин

Ген уборки – добавлены режимы для дезинфекции в оперблоках, родзалах и тд (с коротким временем экспозиции и с экономичной концентрацией)



## Новые режимы дезинфекции Стерокс порошок по туберкулезу (M.Террае)

Объект	Было	Стало
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, приборы и аппараты, предметы обстановки	1,0% - 60 мин 2,0% - 30 мин	0,25% - 90 мин 0,5% - 60 мин 1,0% - 30 мин
Поверхности мягкие (ковры, обивочные материалы, мягкая мебель)	-	1,0% - 60 мин
Кувезы и приспособления к ним	-	0,5% - 90 мин
Медотходы класса В	3,0% - 90 мин	2,0% - 120 мин

# Новые режимы дезинфекции Стерокс порошок по грибковым инфекциям

Объект	Кандидоз		Дерматофитии	
	было	стало	было	стало
Поверхности в помещениях,	0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин	0,25% - 60 мин 0,5% - 30 мин 1,0% - 15 мин	0,5% - 60 мин 1,0% - 30 мин 2,0% - 15 мин	0,25% - 90 мин 0,5% - 60 мин 1,0% - 30 мин
Санитарно-техническое оборудование	1,0% - 60 мин 1,5% - 30 мин	0,5% - 90 мин 1,0% - 30 мин	1,0% - 90 мин 1,5% - 60 мин 2,0% - 30 мин	0,5% - 120 мин 1,0% - 60 мин
Кувезы и приспособления к ним	-	0,5% - 60 мин	-	-
Поверхности мягкие	-	0,5% - 90 мин 1,0% - 30 мин	-	1,0% - 60 мин

# Сравнение режимов дезинфекции ИМН, ДВУ и стерилизации препаратами Стерокс порошок и Секусепт актив

Режим дезинфекции	Стерокс порошок	Секусепт актив
Дезинфекция ИМН (бактерии, вирусы, грибы)	0,5% - 20 мин 1,0% - 10 мин (ручной и механизированный)	0,5% - 20 мин 1,0% - 10 мин
ДВУ	1,0% - 15 мин 2,0% - 5 мин	1,0% - 10 мин 2,0% - 5 мин
Стерилизация	1,0% - 30 мин 2,0% - 15 мин	1,0% - 30 мин 2,0% - 15 мин
Цена препарата (1,5 кг)	1300 руб.	Свыше 3000 руб.